




Anwendungshinweise


Universalfixierung für Zu- und Ableitungen, speziell ZVK.



- 1**
- Haut trocken und fettfrei vorbereiten.
 - Folie vom Halter abziehen und an der passenden Hautstelle anmodellieren.
 - Schutzfolie von der Lasche lösen.

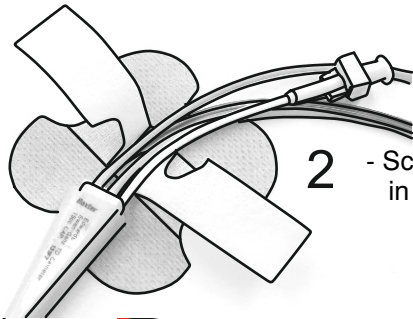

- 2**
- Schläuche / Leitungen in die Klebefläche einlegen.

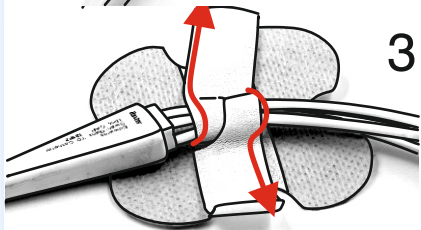

- 3**
- Die Flügel schliessen und leicht andrücken.
 - Klebt nicht komplett bedecken (lässt sich besser entfernen).



- Zur Befestigung von Flachfiltern und andere Bauteilen
- Einfach den Filter auf die Klebefläche drücken.

- Der Patient kann gewaschen bzw. geduscht werden, die Fixierung hält auch wenn sie nass wird.
- Die Fixierung kann mehrmals geöffnet und wieder verschlossen werden.



Liegedauer je nach Anwendung bis 3 Tage, Hydrocoll. - 6 Tage.

Unifix Vliesbasis




Unifix Art. Nr. 8501500

Unifix Hydrocolloid



Unifix Hydroc. Art. Nr. 8501509

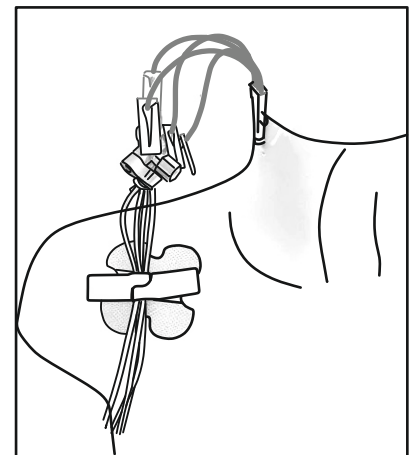

Die meisten Teile des SECUTAPE® Systems lassen sich miteinander kombinieren. Secutape-Fixierungen sind zuverlässig und bieten den unter den Gegebenheiten bestmöglichen Halt auf der Haut.