


Anwendungshinweise

Standardfixierung


Zur Fixierung bzw. Zugentlastung von:

- PEG
- CAPD
- ZVK
- Suprapubischen Kathetern
- Infusionen / NFC
- Urin-Kathetern
- Redondrainagen
- Ports
- Wunddrainagen
- Sonden zur Druckmessung
- und allen anderen "Schläuchen/Leitungen"

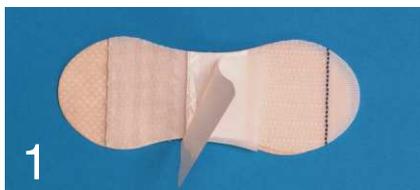


1

- Haut trocken und fettfrei vorbereiten.
- Folie von der Rückseite abziehen.
- Fixierung auf die geeignete Hautstelle kleben
- und leicht anstreichen.

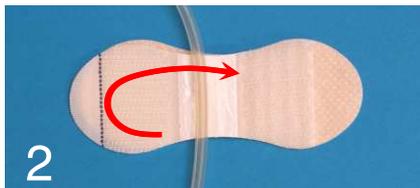

2

- Schutzfolie der Klettflasche entfernen und Schlauch in die Klebefläche einlegen.

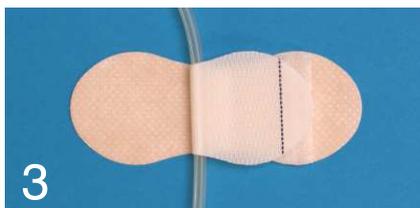

3

- Klettflasche schliessen und leicht andrücken.
- Kann mehrfach geöffnet und wieder verschlossen werden.

Standardfixierung

Grösse 2+
Art. Nr.
8500201



Grösse 3+
Art. Nr.
8500301



Liegedauer je nach Anwendung bis 4 Tage

Der Schlauch kann aus der Klettflasche entnommen und immer wieder fixiert werden.

Die Fixierung hält auch wenn sie nass wird.

Bei stärkerer Zugbelastung Gr. 3+ verwenden !

Die meisten Teile des SECUTAPE® Systems lassen sich miteinander kombinieren. Secutape-Fixierungen sind zuverlässig und bieten den unter den Gegebenheiten bestmöglichen Halt auf der Haut.