




Anwendungshinweise

Fixier-Set für Endotrachealtuben

Weiche, hypoallergene nicht dehnende Nylonbänder.

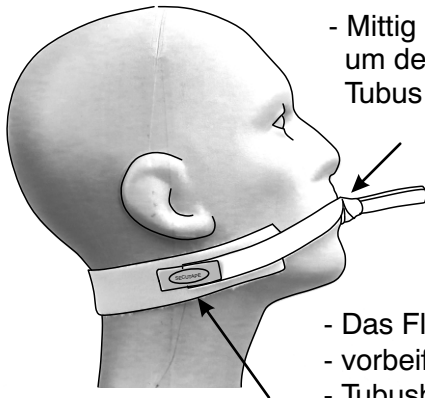


- Die Abdeckung vom Tubusband lösen.
- Mittig mit der Klebefläche zweimal um den trockenen und fettfreien Tubus legen und festziehen.

- Das Flauschband hinter dem Kopf vorbeiführen und je ein Ende des Tubusbands mit dem beiliegenden Klettplättchen am Flauschband befestigen.


Tip!

Für einfacheres Handling, auf beiden Seiten je einen Fixierhalter anbringen (aufkleben) danach das Flauschband hinter dem Kopf vorbeiführen und die beiden Enden an den Haltern befestigen.

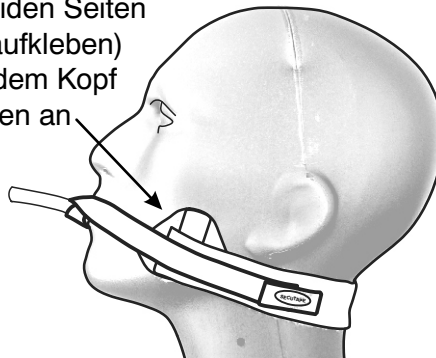

Danach das Tubusband anbringen und die Enden mit den SECUTAPE Klettplättchen befestigen.

- Sehr gut haltende sichere Fixierung, bei Verschmutzung muss nur das Tubusband gewechselt werden.
- Beim Einsatz von Fixierhaltern ist auch problemloses Absaugen mit einer Person möglich.

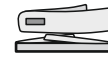


Soft-Set

für Endotrachealtuben

Soft-Set
Art. Nr.
8500900



Fixierhalter
Art. Nr.
8500700

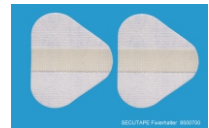

Das Softband ist auch einzeln erhältlich



Beim Einsatz von Fixierhaltern.

Absaugen und Mundpflege:
Beide Enden auf einer Seite befestigen, so bleibt der Tubus fixiert und gesichert!

Die meisten Teile des SECUTAPE® Systems lassen sich miteinander kombinieren. Secutape-Fixierungen sind zuverlässig und bieten den unter den Gegebenheiten bestmöglichen Halt.